

AUTOCLAVE 12l, 18l, 23l

Ref. 09070063

Ref. 09070064

Ref. 09070095




AUTOCLAVE 12l, 18l y 23l TIPO B

El Autoclave Clase B de última generación está indicado para la esterilización de instrumental y está diseñado especialmente para su uso en clínicas, hospitales, laboratorios...

El autoclave cuenta con una pantalla y un teclado que facilita el uso del autoclave, pudiendo configurar y ejecutar el programa deseado, de forma rápida y sencilla. Además, dispone de un sistema de registro, que permite guardar cada registro de ciclo de esterilización en un pen drive gracias a su conector USB o bien imprimirlo en formato papel.

Por otro lado, y para asegurar una esterilización efectiva, el equipo realizará auto-diagnósticos en los casos que existe sobrecalentamiento o una elevada presión. La parte interior del autoclave tiene un recolector de agua condensada que previene el vapor que pueda contaminar el medio ambiente.

Por ser un autoclave de Clase B, realiza un ciclo de secado al final del proceso de esterilización, dejando los instrumentos listos para su uso.

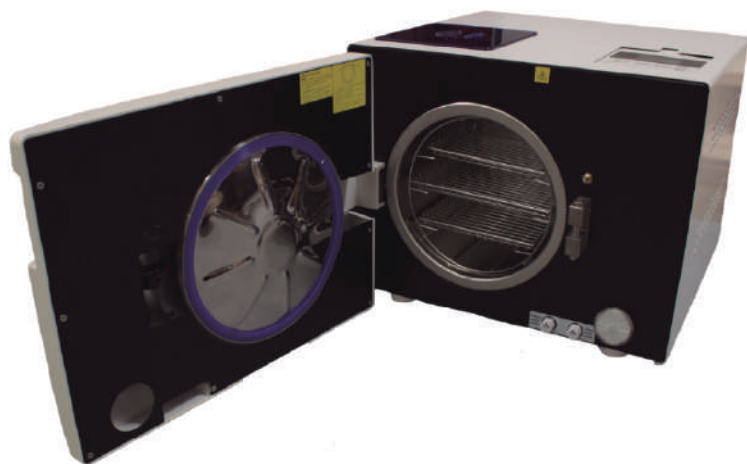


Alimentación	220V / 50Hz
Potencia	2400 kW
Pantalla	LCD
Bloqueo	Eléctrico y mecánico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Referencias	Capacidad	Dimensiones de la cámara
09070063	12 litros	20cm x 36cm
09070064	18 litros	25cm x 35cm
09070095	23 litros	25cm x 45cm

Dimensiones del autoclave	63cm x 44cm x 49cm
Peso	43kg
Presión máx. de trabajo	0.23MPa
Temperatura máx. de trabajo	134°C - 137°C

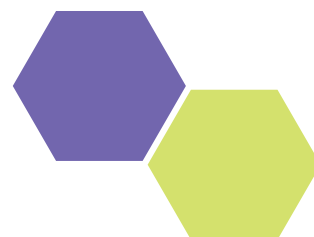

PROGRAMAS DISPONIBLES:

Proceso	Tiempos de vacío	Tiempo de esterilización	Temperatura de esterilización	Presión de esterilización	Tiempo de Vacío	Tiempo de secado
121°C - Material Sólido 121°C - Solid*	1**	20 min	121°C	110kPa		3**
121°C - Material Poroso 121°C - Porous*	3**	20 min	121°C	110kPa		7**
121°C - Material Hueco 121°C - Hollow*	3**	20 min	121°C	110kPa		10**
134°C - Material Sólido 134°C - Solid*	1**	4 min	134°C	210kPa		3**
134°C - Material Poroso 134°C - Porous*	3**	4 min	134°C	210kPa		7**
134°C - Material Hueco 134°C - Hollow*	3**	4 min	134°C	210kPa		10**
Definido por usuario User Defined*	3**	5 min	134°C	210kPa		10**
B-D TEST*	3	4 min	134°C	210kPa		7
TEST de Vacío Vacuum TEST*					15 min	
Proceso de limpieza Clean Process*	3	5 min	105°C	20kPa		10
Prion TEST*	3	19 min	135°C	210kPa		10

* Nombre de programa en la pantalla LCD del autoclave

** Los valores con "***" pueden ser ajustados

B-D TEST: La cuenta atrás del tiempo indica 4min. En la mayoría de las veces este test tomará 3.5min para finalizar.

DIMENSIONES:

